



1

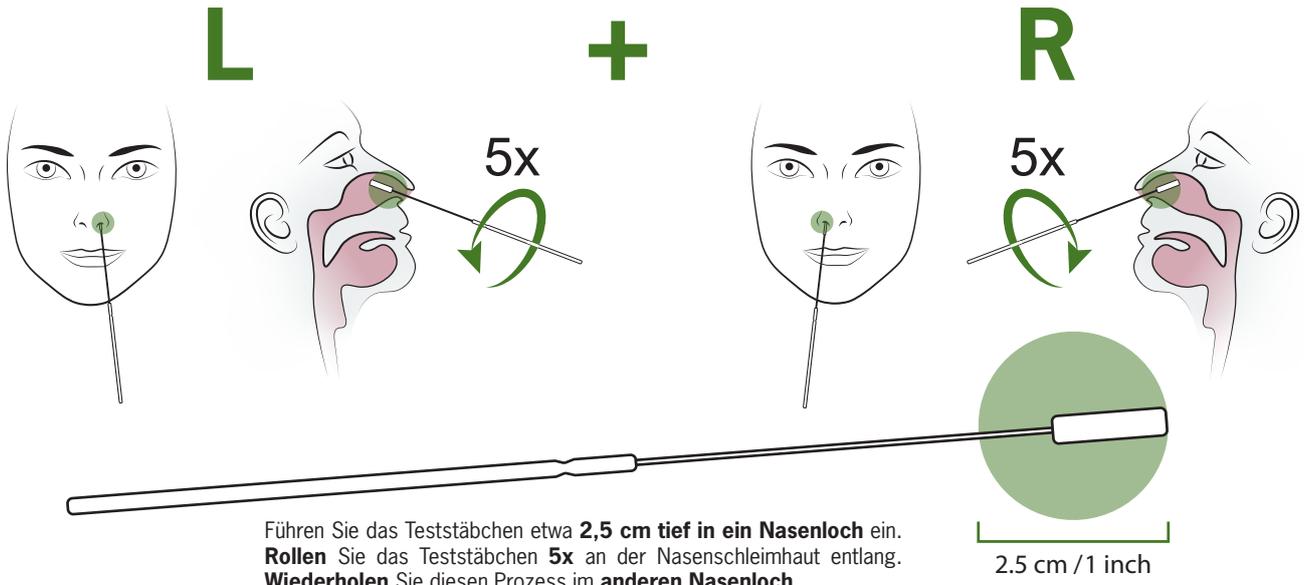

Führen Sie das Teststäbchen etwa **2,5 cm tief in ein Nasenloch** ein. **Rollen** Sie das Teststäbchen **5x** an der Nasenschleimhaut entlang. **Wiederholen** Sie diesen Prozess im **anderen Nasenloch**.

2

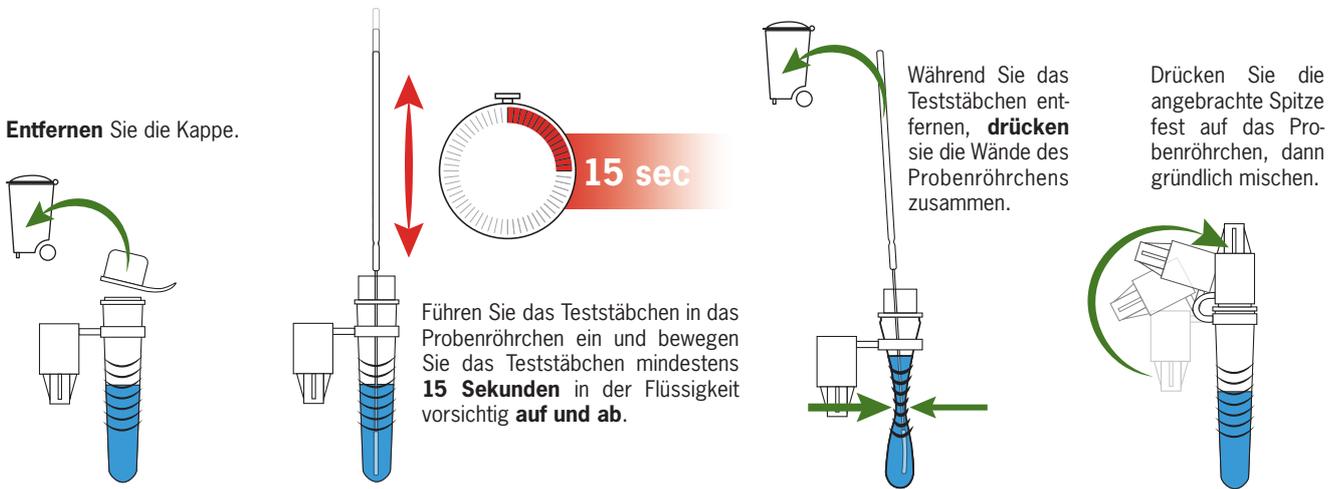


Entfernen Sie die Kappe.

Führen Sie das Teststäbchen in das Probenröhrchen ein und bewegen Sie das Teststäbchen mindestens **15 Sekunden** in der Flüssigkeit vorsichtig **auf und ab**.

Während Sie das Teststäbchen entfernen, **drücken** sie die Wände des Probenröhrchens zusammen.

Drücken Sie die angebrachte Spitze fest auf das Probenröhrchen, dann gründlich mischen.

3

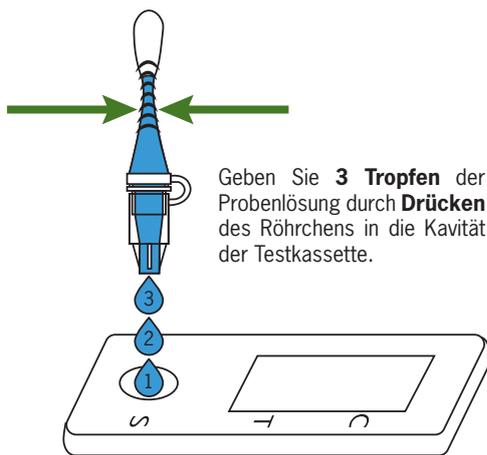


Geben Sie **3 Tropfen** der Probenlösung durch **Drücken** des Röhrchens in die Kavität der Testkassette.




Warten Sie **15 Minuten** nach Probenauftrag auf das Ergebnis.

4

Beurteilen Sie das Testergebnis **innerhalb** eines Zeitfensters von **5 Minuten**.

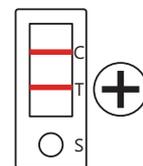

Corona positive

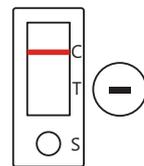

Corona negative

